

장애아동 유모차

산책

- 사용자 설명서 -



 **HYUNDAI W'HYUP**



안전 사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위해,
유모차 사용 전 **반드시 사용 설명서를 숙지한 후 사용해 주십시오.**

목차

03 목차

04 부품별 명칭

05 조립 방법

07 분리 방법

10 제품 사용 방법

폴딩

언폴딩

핸드스트랩

등받이

레그레스트

안전벨트

브레이크

통풍시트 걸이

중간 허리벨트

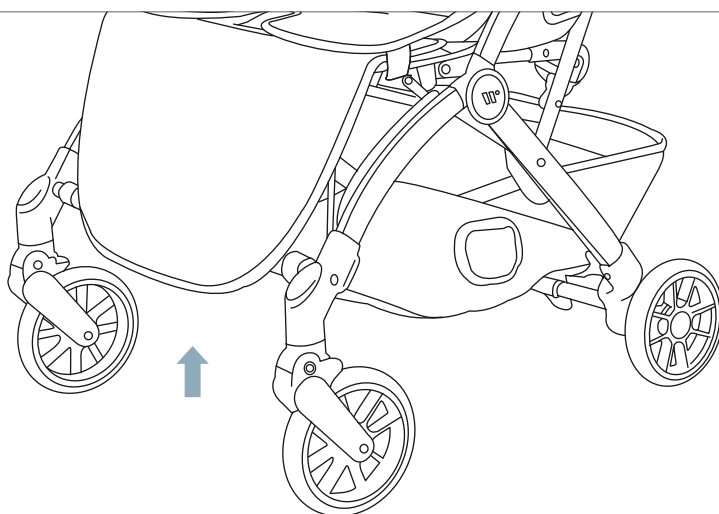
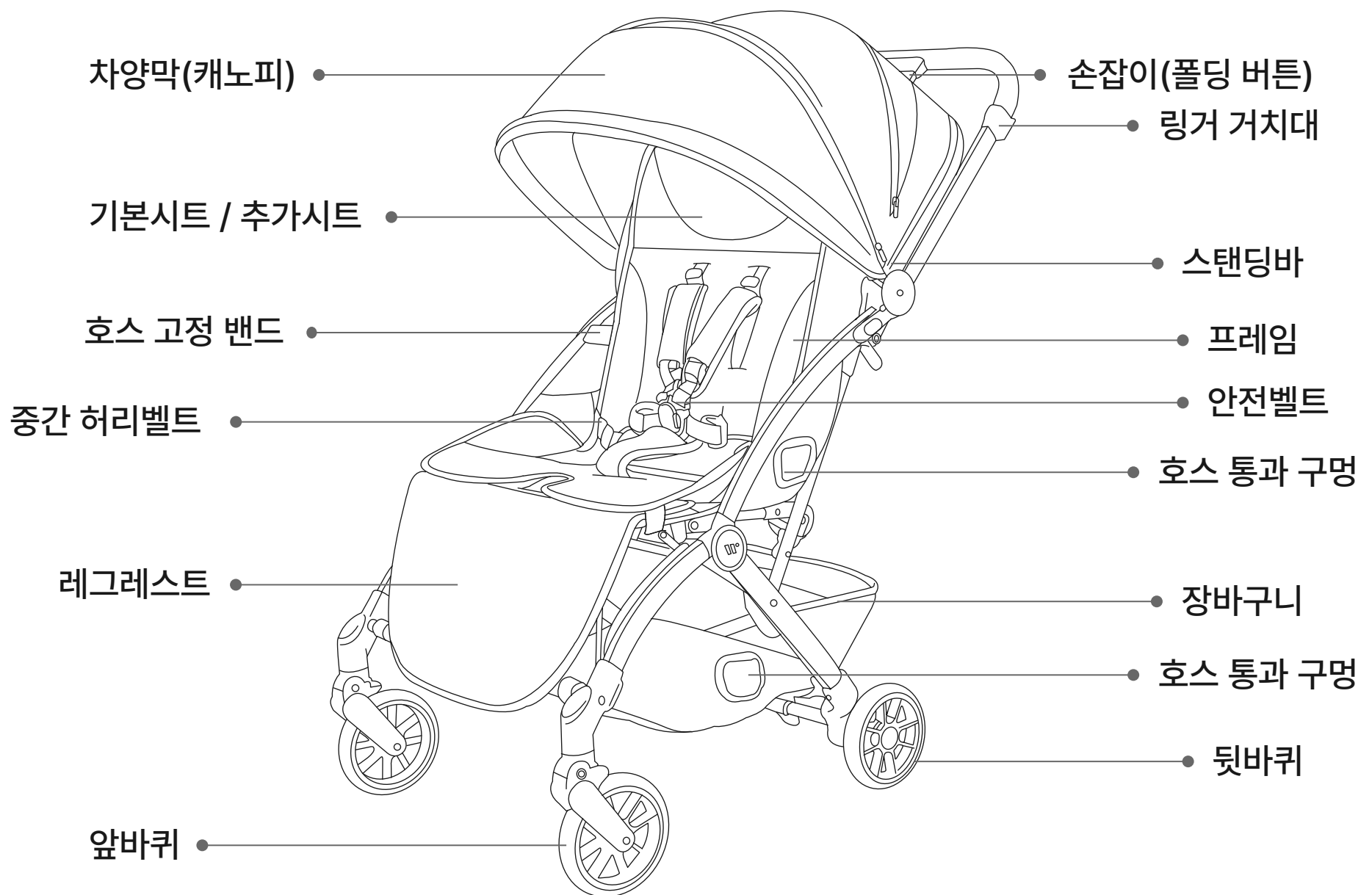
호스 고정

통풍시트걸이

13 주의 사항

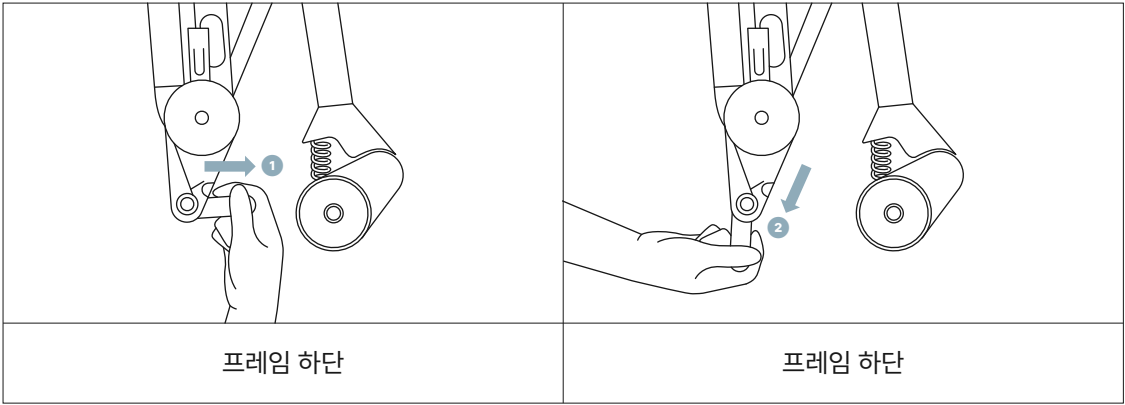
14 문의

부품별 명칭

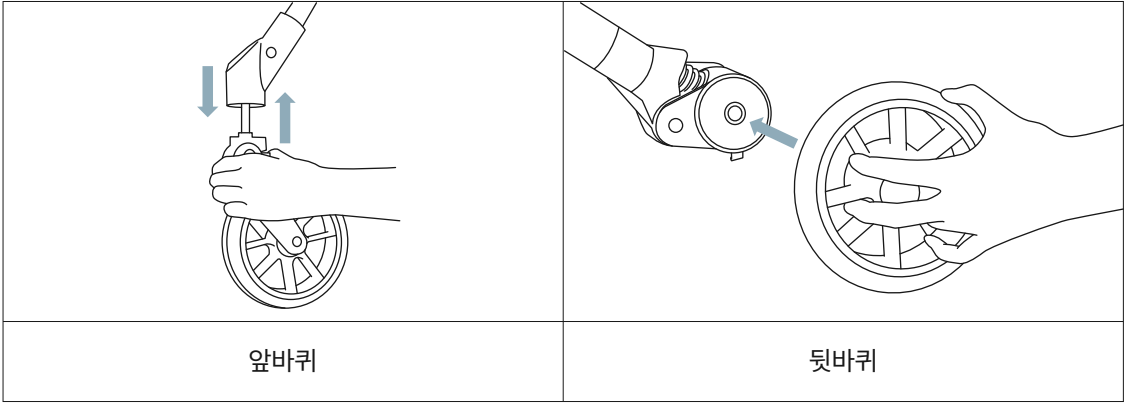


시리얼 넘버는 제품 발판 하단에
표기되어 있습니다.

조립 방법



※ 스탠딩바는 제품 포장을 위해 접힌 상태로 출고되며, 제품 수령 후 올바른 방법으로 스탠딩바를 펴주셔야 안정적으로 셀프 스탠딩이 가능합니다.



스탠딩바

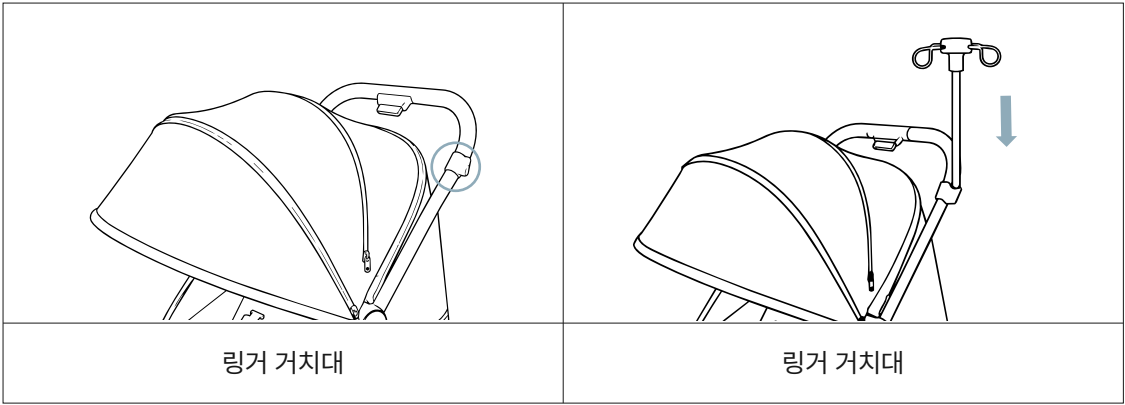
프레임 하단에 위치한 스탠딩바를 그림의 화살표❶ 방향으로 당긴 후, 화살표❷ 방향으로 펴 주세요.
* 그냥 각도를 변경하면 부품이 파손될 위험이 있으므로, 반드시 위 내용대로 각도를 변경해 주세요.

바퀴

앞바퀴를 전방 프레임 구멍에 맞게 삽입해 주세요.

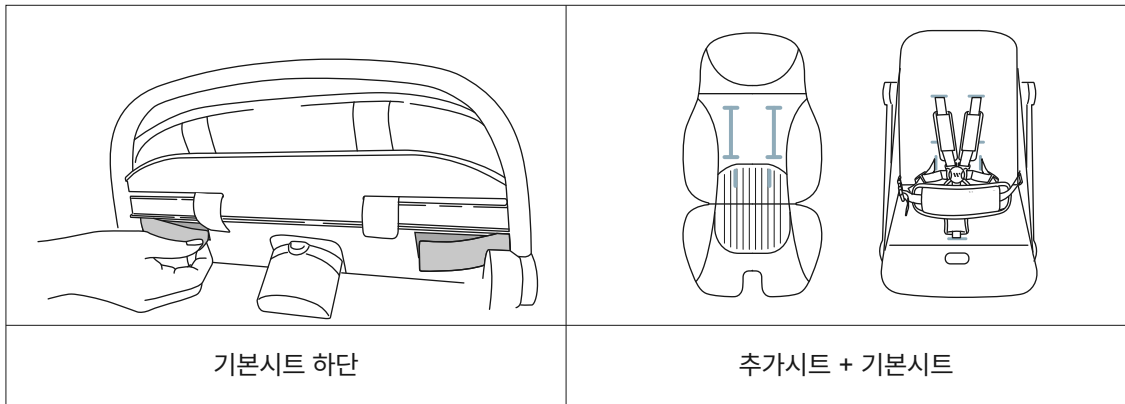
사진과 같이 뒷바퀴를 후방 프레임의 구멍에 맞게 삽입해 주세요.

조립 방법



링거 거치대

캐노피 좌측 방향에 옆면 프레임의 전용 홈에 거치대 하단을 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어 고정합니다.

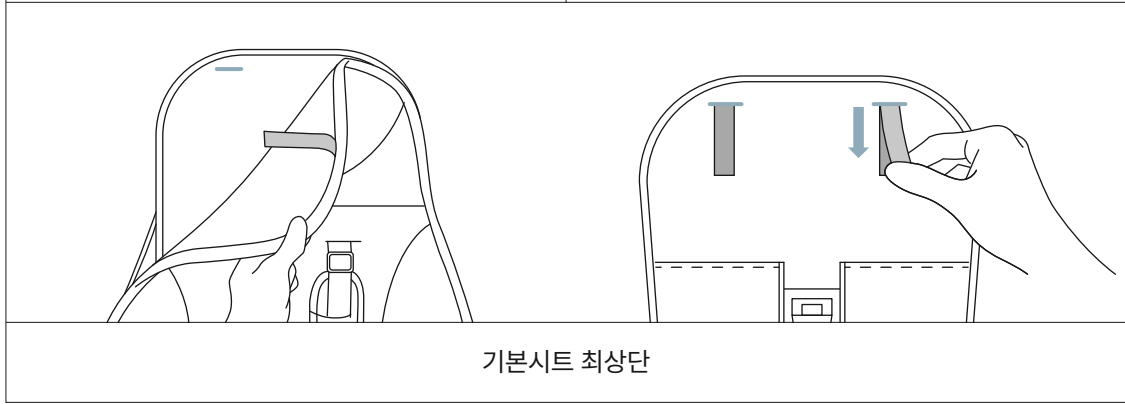


추가시트

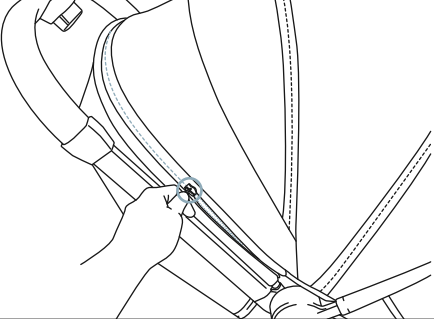
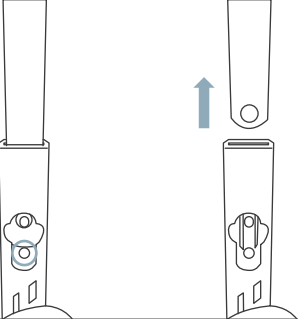
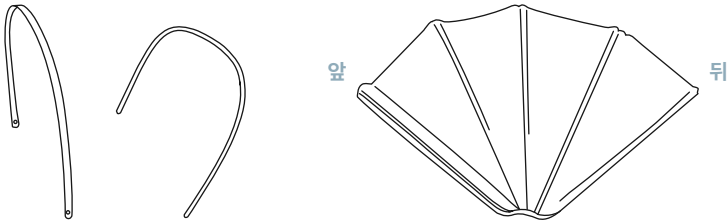
추가시트의 하단 벨크로를 그림과 같이 기본시트 하단 벨크로에 부착해 주세요.

각 구멍에 맞게 5점식 벨트를 빼내 주세요.

추가시트의 상단 벨크로를 기본시트의 구멍에 맞게 통과시킨 뒤 상단 후면 벨크로에 부착해 주세요.



분리 방법

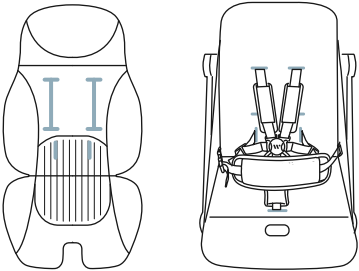
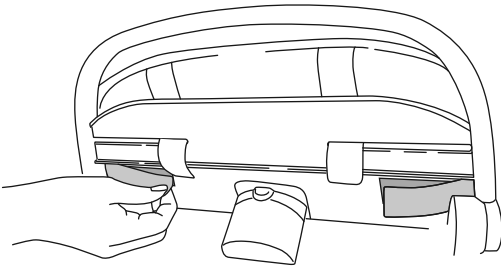
	
기본시트 연결 지퍼	캐노피대 [대] 결합 부분
	
캐노피대 + 캐노피	

캐노피

캐노피 왼쪽에 있는 지퍼를 오른쪽으로 당겨 분리해 주세요.

앞쪽 캐노피대 [대]는 결합 부분 안쪽의 작은 동그라미 버튼을 끝까지 누른 채 뽑아 주세요. 뒤쪽 캐노피대 [소]는 버튼 없이 들어올려 위로 빼 주세요.

캐노피에서 캐노피대 [대]와 캐노피대 [소]를 모두 분리해 주세요.

	
추가시트 최상단	
	
추가시트 + 기본시트	기본시트 하단

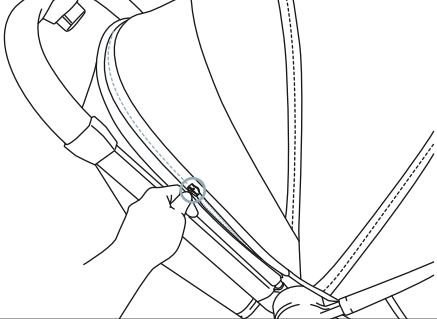
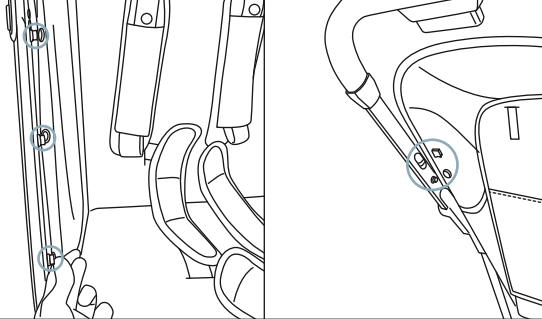
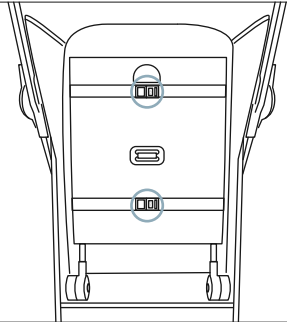
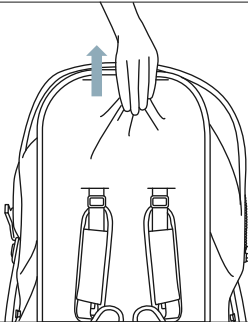
추가시트

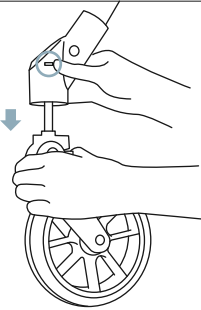
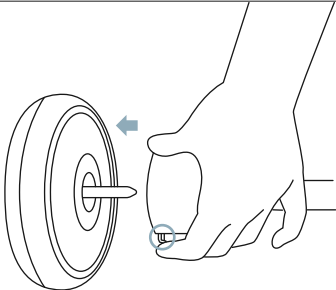
추가시트 상단 벨크로 2개를 구멍에서 빼내어 분리해 주세요.

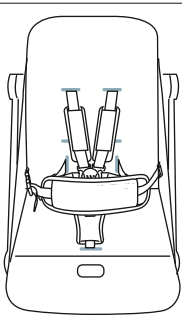
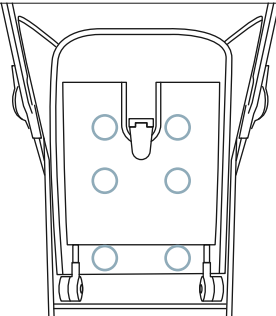
기본시트와 붙어 있던 추가시트의 벨크로를 떼면서 어깨 벨트 / 허리 벨트를 빼 주세요.

추가시트 하단 벨크로를 기본시트에서 분리해 주세요.

분리 방법

	
캐노피 지퍼 분리	똑딱이 및 고리 분리
	
하단 연결 벨트	들어올려 분리

	
앞바퀴 분리	뒷바퀴 분리

	
유모차 앞면	유모차 뒷면

* 고정 플라스틱 위치 안내 고정 플라스틱은 기본시트 커버 안쪽에 위치하고 있습니다.

기본시트

캐노피 왼쪽에 있는 지퍼를 오른쪽으로 당겨 캐노피를 먼저 분리해 주세요.

추가시트를 분리한 후, 좌우 하단 프레임에 결합된 똑딱이 3개와 기본시트 상단 고리 1개, 똑딱이 1개를 각각 분리해 주세요.

기본시트 하단의 버클 2개를 분리해주세요.

등받이 레버가 걸리지 않도록 정리한 후, 캐노피 대를 잡고 상단으로 들어 올려 분리해 주세요.

바퀴

앞바퀴: 앞바퀴 상단에 은색의 분리 장치를 눌러 주세요. 바퀴 분리 장치를 누른 상태로 앞바퀴를 아래로 잡아 당겨 주세요.

* 손으로 해체가 어려울 시, 미니 드라이버 또는 얇고 단단한 물체를 사용해 주세요.

뒷바퀴: 뒷바퀴 플라스틱 하단에 위치한 은색의 분리 장치를 누르며, 바퀴를 바깥쪽으로 분리해 주세요.

안전벨트

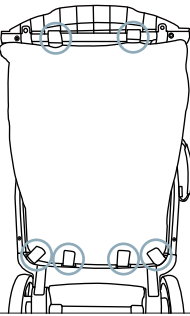
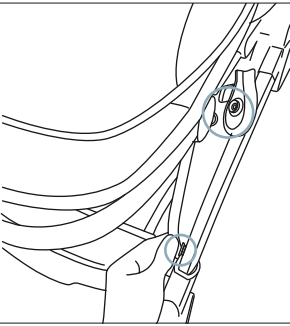
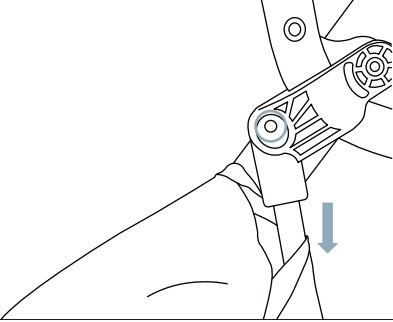
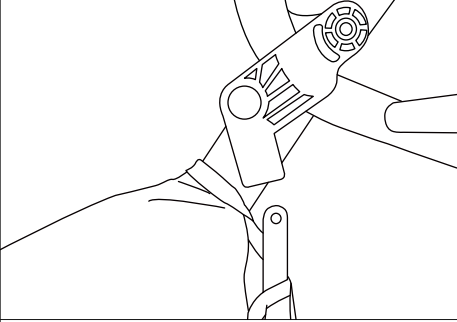
기본시트 후면에 위치한 안전벨트 고정 플라스틱 7개(어깨 벨트 4개 / 허리 벨트 2개 / 가랑이 벨트 1개)의 위치를 확인해 주세요.

* 고정 플라스틱은 각 안전벨트 결합부 후면에 위치하고 있습니다.

안전벨트 고정 플라스틱 7개를 안전벨트 결합부를 통해 유모차 전면으로 통과 시켜 주세요.

* 기본시트에 부착되어 있는 캐노피 벨크로를 해제하시면 더 편하게 안전벨트 탈거가 가능합니다.

분리 방법

	
장바구니 하단 스트랩	장바구니 상단 똑딱이
	
장바구니 대 분리	장바구니 대 분리

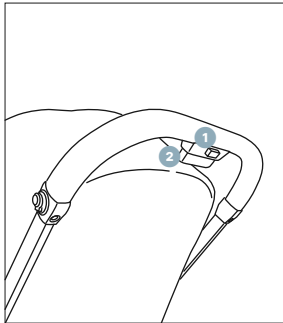
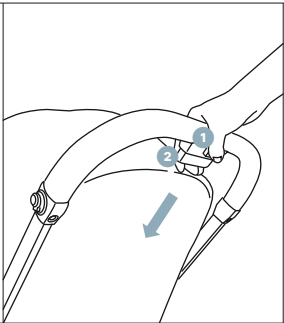
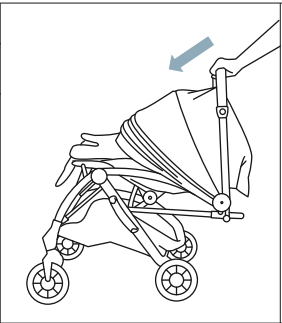
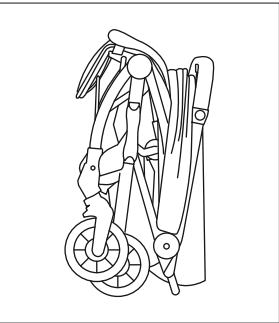
장바구니

하단에 연결된 스트랩을 확인한 후, 고정된 스트랩을 분리해 주세요.

장바구니 상단에 위치한 똑딱이를 확인한 후, 프레임의 똑딱이와 분리해 주세요.

장바구니 대를 확인한 후, 버튼을 눌러 고정된 연결부를 분리 후 당겨서 제거해 주세요.

제품 사용 방법

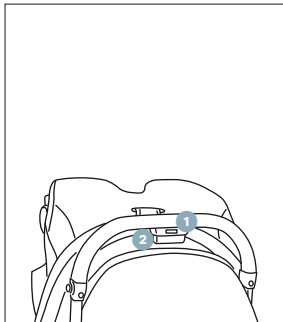
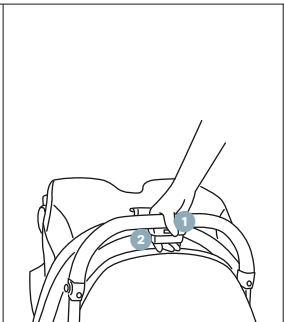
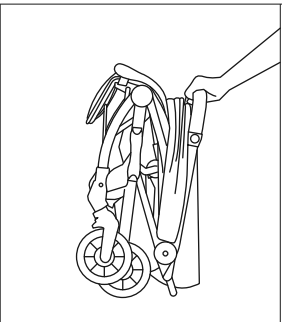
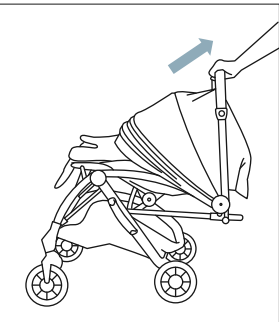
			
폴딩 버튼		폴딩 방법	

폴딩

엄지손가락으로 ❶버튼을 누른 후, 동시에 나머지 네 손가락으로 ❷버튼을 감싸듯이 눌러 락을 풀어 주세요. (이때 손이 작으신 분들은 양손을 활용하셔도 괜찮습니다.)

유모차가 접히는 방향으로 살며시 눌러 주어 자연스럽게 접어 주세요.

- * 폴딩 시 원단류(캐노피,시트 등)가 걸려 폴딩되지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 원단류 장착을 체크해 주시고 재폴딩 해 주세요.
- * 폴딩 후 끝까지 밀어서 고정에 잘 되었는지 꼭 확인해 주세요.

			
언폴딩 버튼		언폴딩 방법	

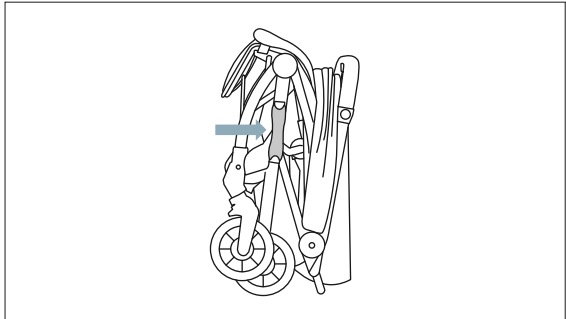
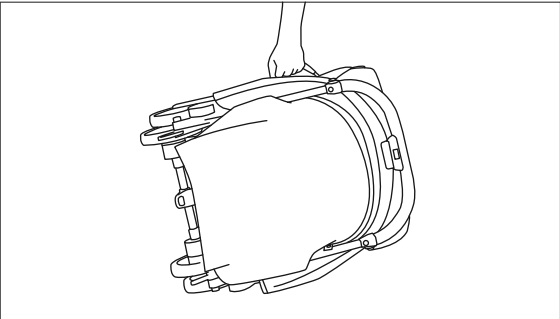
언폴딩

엄지손가락으로 ❶버튼을 누른 후, 동시에 나머지 네 손가락으로 ❷버튼을 감싸듯이 눌러 락을 풀고 살짝 펴 주세요. (이때 손이 작으신 분들은 양손을 활용하셔도 괜찮습니다.)

- * 락을 푼 후 끝까지 버튼을 누를 필요는 없습니다.

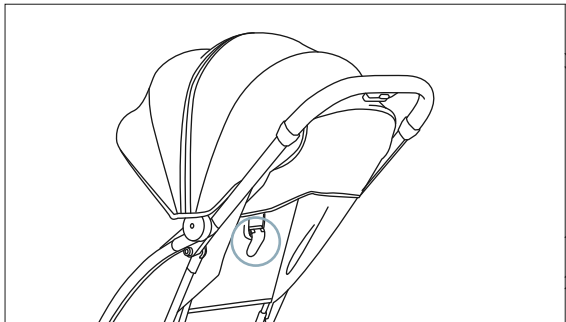
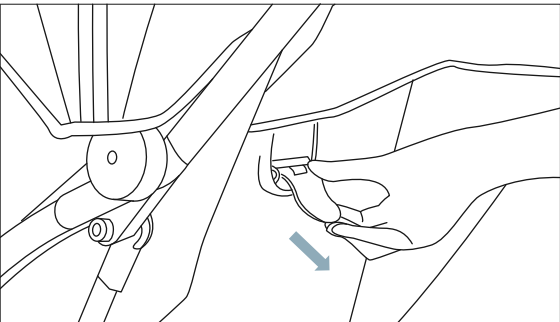
락이 풀렸으면 편하게 잡고 들어올려 언폴딩해 주세요. (언폴딩이 완료되면 탁 소리가 납니다.)

- * 꼭 언폴딩이 잘되었는지 확인 후 아이를 태워 주세요.

	
핸드스트랩 위치	핸드스트랩 이동

핸드스트랩

유모차를 폴딩한 후, 그림과 같은 위치의 핸드스트랩을 활용하여 유모차를 손에 들고 이동해 주세요.

	
등받이 레버 위치	등받이 각도 조절

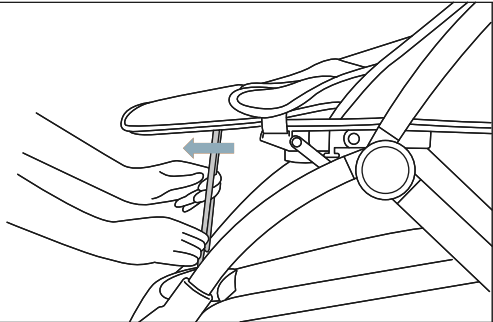
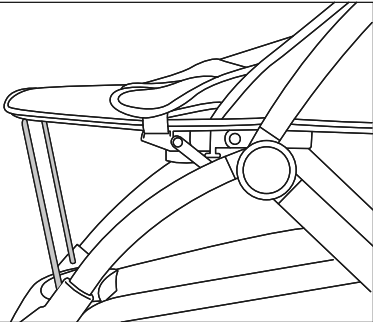
등받이

등받이 각도는 총 4단계로 조절 가능합니다. (95도, 130도, 150도, 175도)

등받이 뒤에 있는 레버를 이용해서 각도 조절이 가능합니다.

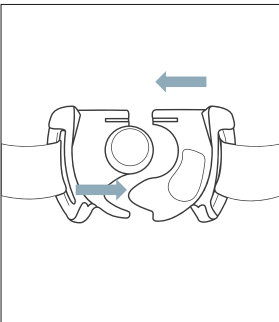
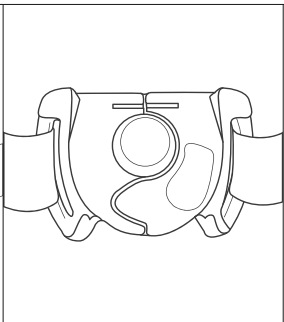
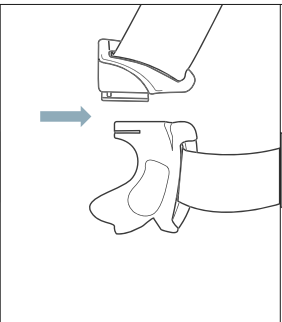
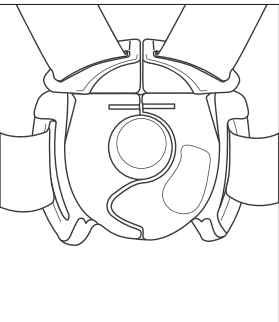
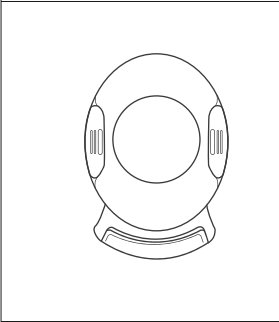
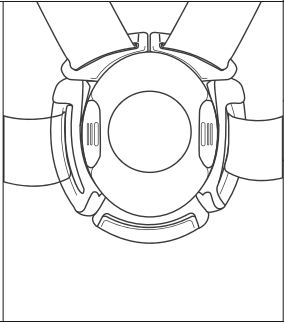
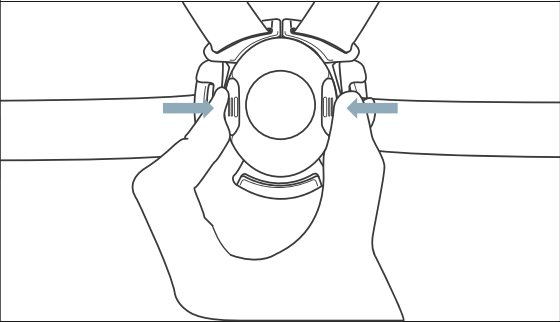
등받이를 올리실 때는 레버 조작을 하지 않아도 가능합니다.

제품 사용 방법

	
레그레스트 하단	레그레스트 각도 조절

레그레스트

유모차 레그레스트 하단의 받침대를 그림과 같이 잡고 ,앞뒤 총 2단계로 각도 조절이 가능합니다.

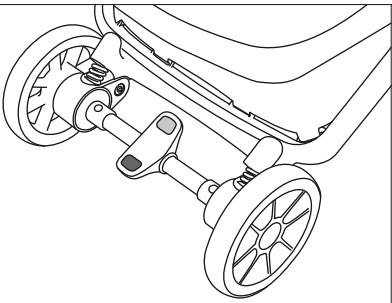
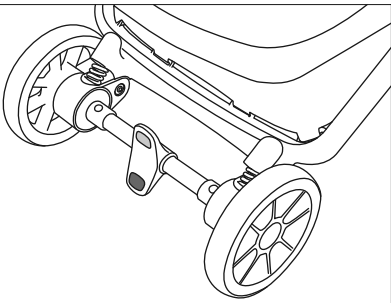
			
3점식 안전벨트		5점식 안전벨트	
			
중앙 벨트 버클(자석)		벨트 분리 방법	

안전벨트

3점식: 양쪽 허리벨트의 버클을 합쳐 주세요. 중앙 벨트 버클을 양쪽 버클에 붙여 주세요. (자석 방식으로 된 버클로 자력에 의해 붙습니다.)

5점식: 어깨와 허리벨트를 연결시킨 다음, 양쪽의 버클을 합쳐 주세요. 중앙 벨트 버클을 양쪽 버클에 붙여 주세요. (자석 방식으로 된 버클로 자력에 의해 붙습니다.)

분리 시, 중앙 벨트 버클에 있는 양쪽 버튼을 눌러 분리해 주세요.
*** 안전벨트가 제대로 결합되지 않으면 벨트 조절이 불가능합니다.**

	
주행일 때	브레이크일 때

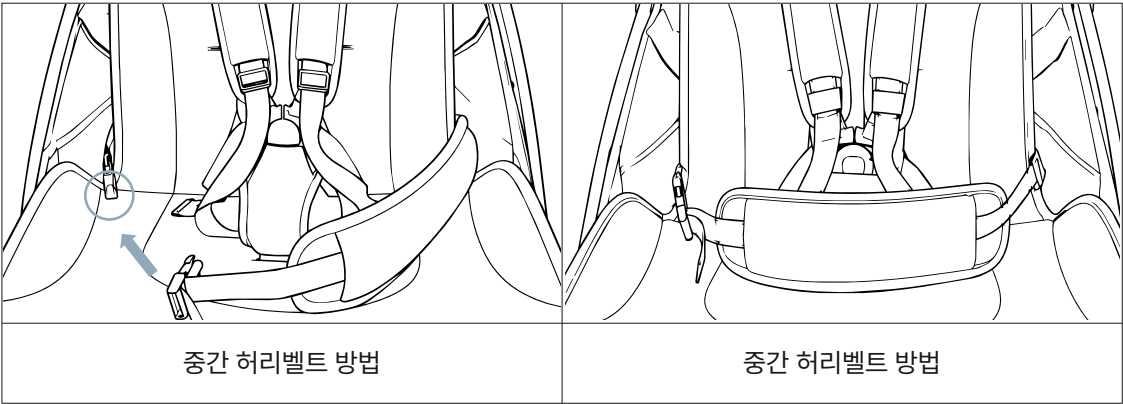
브레이크

브레이크: 진회색
주행: 연회색

핸들바를 잡고 섰을 때, 뒤쪽 방향으로 밟으면 브레이크, 앞쪽 방향으로 밟으면 주행할 수 있습니다.

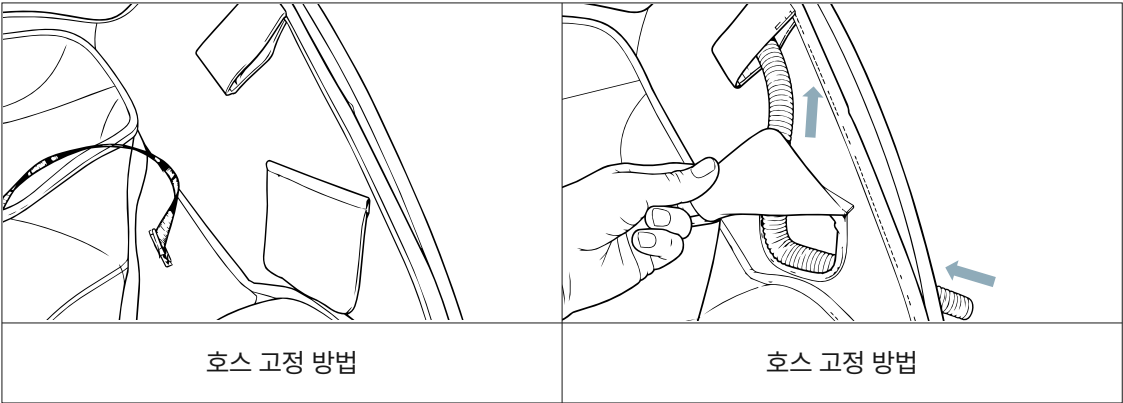
※ 브레이크는 바퀴가 굴러가지 않게 하는 장치입니다. 바퀴가 고정되어 있더라도 바닥의 상태나 기울기에 따라 미끄러질 수 있으니 주의해 주세요.

제품 사용 방법



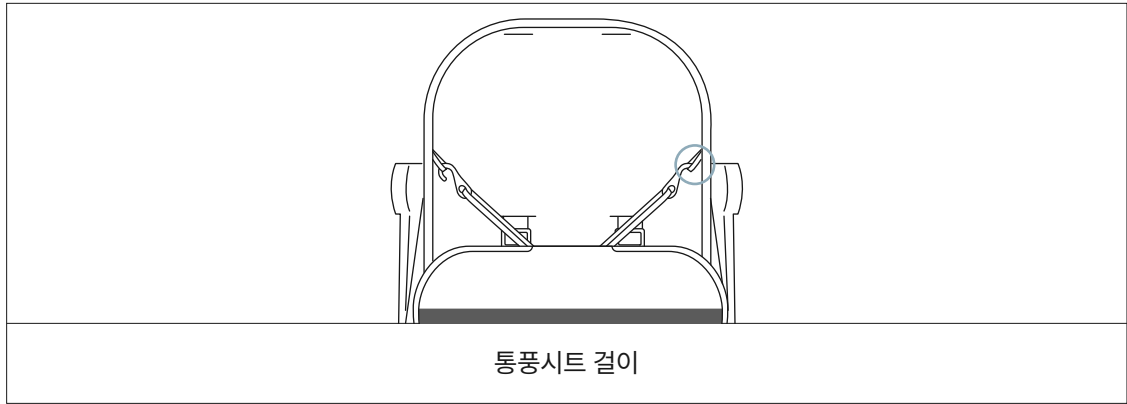
중간 허리벨트

캐노피 우측 방향에 있는 벨트 버클을 '딸깍' 소리가 날 때까지 끼워 고정합니다.



호스 고정

유모차 의자 옆면의 구멍으로 호스를 통과시킨 후, 호스 고정 밴드에 넣어 안전하게 고정합니다.



통풍시트 걸이

통풍시트 걸이를 유모차 상단의 고무줄에 걸어 고정시켜 사용해주세요.

주의 사항

- 유모차 사용 시 반드시 5점식 안전벨트를 체형에 맞게 조절 후 착용하고 사용해 주십시오.
- 유모차를 폴딩하거나 언폴딩 시에 주위에 유아가 접근하지 않도록 해주십시오.
- 유모차에 2명 이상의 유아를 동시에 태우지 마십시오.
- 정해진 곳 외에 애완동물 또는 짐을 올려 사용하지 마십시오.
- 유모차의 사용은 보호자의 동행 하에 사용해 주시고 유모차를 혼자 내버려 두지 마십시오.
- 유모차에 유아를 태운 상태로 들지 마십시오.
- 유아를 태울 때마다 유모차가 제대로 퍼졌는지 확인해 주십시오.
- 유모차의 운행은 보호자의 평균 보행 속도 이내를 유지해 주십시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론 평지에서도 절대로 뛰지 마십시오.
- 가파른 언덕이나 비탈길, 계단이나 에스컬레이터 등 평지가 아닐 경우, 유아 하차 후 따로 운반해 주십시오.
- 유아의 다리에 압박이 가해질 수 있으므로 기울어진 운반 형태를 취하지 마십시오.
- 등받이 각도 조절, 캐노피 사용 등 유아의 손이나 발이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 유아가 정해진 위치가 아닌 곳에(등받이 등) 탑승할 시 전복될 위험이 있습니다.
- 식판 트레이 위에 뜨거운 것이나 무거운 것을 두지 마십시오.
- 제조사에 의해 승인되지 않은 액세서리는 사용하지 마십시오.
- 장바구니의 적정 하중은 최대 15kg이며 아이를 포함하여 유모차 최대 하중을 넘기지 마십시오.
- 해당 유모차를 적어도 1년에 1회 이상 점검하시길 바랍니다.
- 원단 제품은 반드시 차가운 물에 중성 세제를 사용해 손세탁하시고 세탁기를 사용하지 마십시오.
- 반드시 그늘에 말리지 않으면 변색 또는 변형이 생길 수 있습니다.
- 연마제를 사용하지 마십시오.
- 유모차가 장시간 야외에 노출될 경우, 먼지 또는 습기에 의해 바퀴, 서스펜션 등에서 소리가 날 수 있습니다.
이 경우, 구리스와 같은 윤활유를 발라주시기 바랍니다.

문의

상담 가능 시간 안내

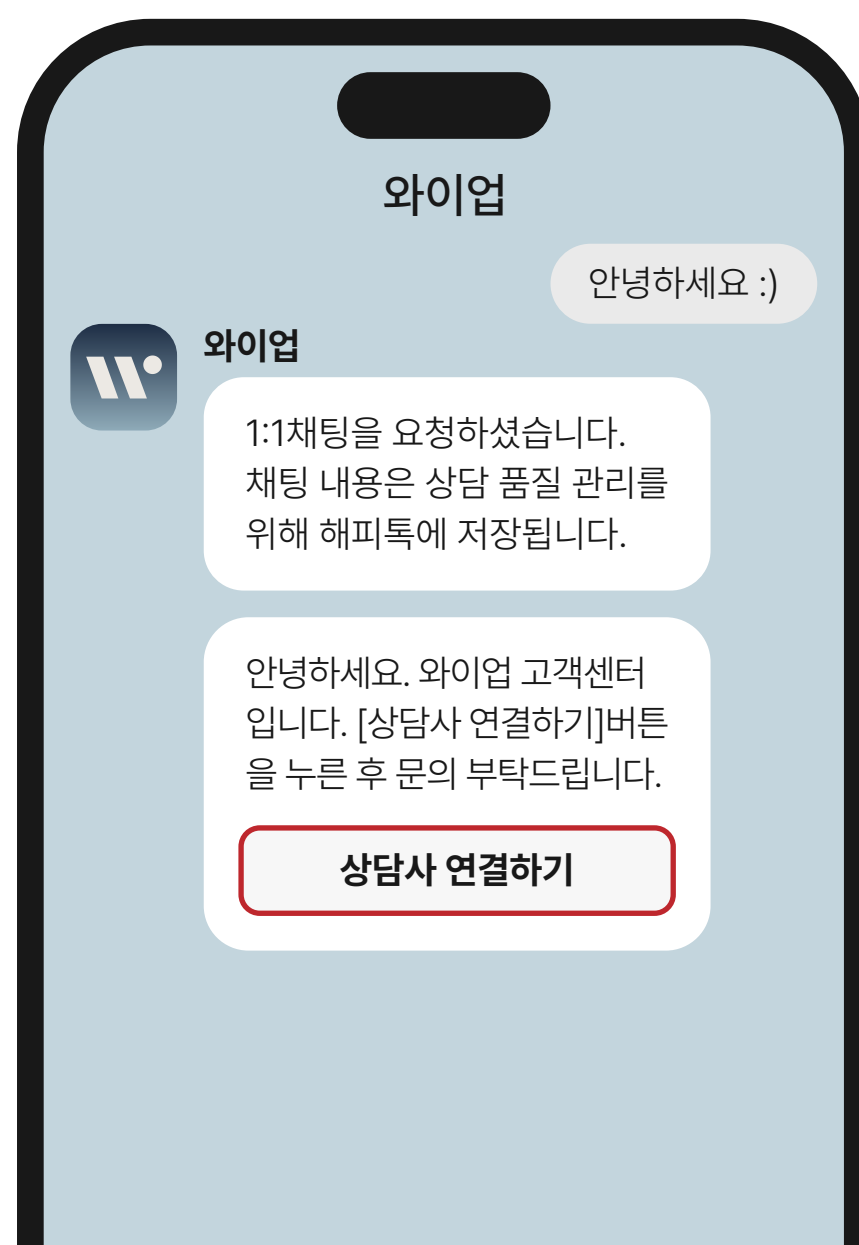
평 일 | 10:00 – 17:00 (공휴일 휴무)

점심시간 | 13:00 – 14:00

문의 방법

- ① 카카오톡 채널에서 와이업을 검색합니다.
- ② 1:1 상담을 원하실 경우, 반드시 **상담사 연결하기 버튼**을 눌러주세요.

* 상담 시간 이전 또는 이후에 문의하실 경우, 상담사 연결이 어려울 수 있습니다.





CB131R380-6002

www.yupbaby.co.kr

품 명 산책
모 델 명 유모차
제조국명 Designed in Korea | Made in China
제조자명 Zhongshan Youyoubei Daily Products Co.,Ltd
수입자명 (주)유아용품연구소
주 소 경기도 고양시 덕양구 향동로 218 현대테라타워DMC B729호
고객센터 카카오톡 채널 '와이업'



와이업



@whyup.official

제품 사양은 품질 개선 및 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 설명서에 사용된 일러스트는 설명용으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.